



GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch

Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung

Das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch ist ein Tragetuch nach DIN EN 1865-1. Es ist speziell für den Transport von verletzten und/oder erkrankten Atemschutzgeräteträgern aus dem Gefahrenbereich vorgesehen. Darüber hinaus kann das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch als herkömmliches Tragetuch nach DIN EN 1865-1 angewendet werden.

Bestimmungsgemäße Anwendung

Bei dem GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch handelt es sich um ein Medizinprodukt, das gemäß Medizinprodukte Betreiber Verordnung – MPBetreibV - nur von eingewiesenem und regelmäßig auf das Produkt geschultem Fachpersonal angewendet werden darf. Für die Durchführung der Einweisung ist der Betreiber des Medizinproduktes verantwortlich. Die Art der Anwendung richtet sich nach den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften.

- Offene Wunden oder nicht intakte Hautareale nach den aktuellen Empfehlungen zur aseptischen Wundbehandlung versorgen und steril abdecken
- Überprüfung der Unversehrtheit des GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch vor jeder Anwendung

Vor der Anwendung die Verpackungs-Hülle entfernen und das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch auseinander falten. Zum Transport des Patienten das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch faltenfrei unter die Person positionieren. Durch gleichmäßige Nutzung der 8 Griffe an den Längsseiten des Tragetuches den Patienten anheben und transportieren.



Auf gleichmäßige Belegung der Griffe achten. Das Gewicht des Patienten muss auf dem GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch gleichmäßig verteilt sein



Beachten Sie die für Sie geltenden Arbeitsschutzrichtlinien bei der Anwendung des GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch

Das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch ist zur mehrfachen Anwendung nach sachgerechter Wiederaufbereitung vorgesehen. Durch die PE-Oberflächen-Beschichtung ist es besonders hygienisch und Flüssigkeits- undurchlässig, wodurch Tragen und Unterlagen geschont werden. Es kann in einem Temperaturbereich von -20°C - +70°C angewendet werden.

Vorgesehene Patientengruppe

- Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Anwendung bei Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen

Die Anwendung des GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch bei diesen Patientengruppen bedarf keiner besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Bei der spezifischen Behandlung sind die Therapieempfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften zu beachten.

Medizinprodukte, die gemeinsam mit dem GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch verwendet werden können

Das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch kann bei bestimmungsgemäßer Anwendung mit allen zum Transport oder Lagerung von Patienten bestimmten Medizinprodukten kombiniert werden. Als Beispiele hierfür gelten: Krankentrage, Vakuummatratze, Schaufeltrage, Spineboard/Langes Wirbelsäulenbrett, Tragestuhl nach DIN EN 1865-1 oder Helikoptertrage, Krankbett, Röntgentisch, Ambulanzliege usw.

(Liste nicht abschließend – bei fraglicher Kombinationsmöglichkeit bitte Kontakt mit dem Sicherheitsbeauftragten für Medizinprodukte des Herstellers unter mpsicherheit@werkverein-ge.de aufnehmen)

Unerwünschte Nebenwirkungen bei Anwendung des Medizinproduktes

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch sind keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten.

Überprüfung des sicheren und betriebsbereiten Zustandes des Medizinproduktes

Vor Anwendung des GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch muss dieses durch eine Sichtkontrolle auf einen einwandfreien Zustand hin überprüft werden. Dies gilt insbesondere für sachgerecht wiederaufbereitete GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetücher.



Als Maßnahme bei vermuteter oder offensichtlicher Beschädigung eines GERET®-Breit Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuches darf dieses Medizinprodukt nicht angewendet werden und sollte umgehend gegen ein neues, original verpacktes GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch ausgetauscht werden.

Hinweise zu eventuellen wechselseitigen Störungen bei Untersuchungen und Behandlungen

Das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch ist durchlässig für Röntgenstrahlung. Durch die Metallösen und den Verschluss kann es zu Interaktionen und Störungen bei der Durchführung von Röntgenuntersuchungen / Computertomographien / Magnetresonanztomographien kommen. Vor der

Durchführung dieser Untersuchungen muss das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch unter dem Patienten entfernt werden.

Wiederaufbereitung - Reinigung und Pflege / Desinfektion

Das GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch kann mit Wasser und einer Seifenlösung grob gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung der PE beschichteten Oberfläche führen kann, ist zu vermeiden. Desinfektion, in Form einer Oberflächen-Wischdesinfektion, ist mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln der Substanzklassen der Alkohole, Aldehyde und Amine möglich.

Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen, was wiederum die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Produktes beeinflussen kann. Keine Lösungsmittel verwenden!

Bei Fragen zur Anwendbarkeit spezieller Desinfektionsmittel kontaktieren Sie bitte den Sicherheitsbeauftragten für Medizinprodukte des Herstellers unter mpsicherheit@werkverein-ge.de.

Wiederverwendbarkeit des GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch

Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden.



Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte in einwandfreiem technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

Technische Angaben

Länge x Breite:	210 x 110 cm
Maße verpackt :	40 x 30 x 8 cm
Gewicht :	1600 g
Maximale Belastbarkeit :	500 kg

Das Produkt ist latexfrei



Gewährleistung

Für dieses Produkt übernimmt der Hersteller die Gewährleistung, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Diese erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller.

Angaben zur sachgerechten Entsorgung des Medizinproduktes

Die Verpackungs-Hülle kann, nach den lokalen Vorgaben, im Kunststoffabfall entsorgt werden. Nach einer ordnungsgemäß durchgeführten Desinfektion kann das gebrauchte GERET®-Breit - Feuerwehr- Rettungs- und Tragetuch im Restmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie Ihre lokalen Vorgaben zur Entsorgung von Restmüll.



Hersteller:

Gelsenkirchener Werkstätten
für angepaßte Arbeit gGmbH
BrauKämpferstrasse 100
D - 45899 Gelsenkirchen
Fon: +49 (0) 209 / 95896-0
Fax: +49 (0) 209 / 95896-8484

eMail: sales@rettungstuch.com

Internet: www.rettungstuch.com

Stand 01.12.2019



Dieses Produkt ist konform mit den
Grundlegenden Anforderungen der EG Richtlinie
93/42/EWG für Medizinprodukte

Technische Änderungen vorbehalten



**Die Inhalte dieser Gebrauchsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche
Verwendung, auch nur auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung.**