



GERUT® Umbettungstuch

Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung

Das GERUT® Umbettungstuch ist ausschließlich für die schonende Umlagerung eines Patienten von z.B. einer Patiententrage / Helikoptertrage in ein Krankenbett oder auf einen Röntgentisch, oder umgekehrt, vorgesehen.

Bestimmungsgemäße Anwendung

Vom Einsatz vor Ort bis zur Versorgung im Klinikbereich ist das GERUT® Umbettungstuch eine sichere und zuverlässige Unterlage, zum Schutz der Trage. Bei dem GERUT® Umbettungstuch handelt es sich um ein Medizinprodukt, das gemäß Medizinprodukte Betreiber Verordnung – MPBetreibV - nur von eingewiesenem und regelmäßig auf das Produkt geschultem Fachpersonal angewendet werden darf. Für die Durchführung der Einweisung ist der Betreiber des Medizinproduktes verantwortlich. Die Art der Anwendung richtet sich nach den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften.

- Offene Wunden oder nicht intakte Hautareale nach den aktuellen Empfehlungen zur aseptischen Wundbehandlung versorgen und steril abdecken
- Überprüfung der Unversehrtheit des GERUT® Umbettungstuches vor jeder Anwendung



Das GERUT® Umbettungstuch ist kein Tragetuch nach DIN EN 1865

Vor der Anwendung die Verpackungs-Hülle entfernen und das GERUT® Umbettungstuch auseinander falten. Zum Umbetten das GERUT® Umbettungstuch faltenfrei unter den Patienten positionieren. Durch gleichmäßige Nutzung der 12 Grifflöcher den Patienten anheben und umbetten.



Auf gleichmäßige Belegung der Griffe achten. Das Gewicht des Patienten muss auf dem GERUT® Umbettungstuch gleichmäßig verteilt sein



Beachten Sie die für Sie geltenden Arbeitsschutzrichtlinien bei der Anwendung des GERUT® Umbettungstuches

Das GERUT® Umbettungstuch ist zur mehrfachen Anwendung nach sachgerechter Wiederaufbereitung vorgesehen. Durch die PE-Oberflächen-Beschichtung ist es besonders hygienisch und Flüssigkeits- und durchlässig, wodurch Tragen und Unterlagen geschont werden. Es kann in einem Temperaturbereich von -20°C - +70°C angewendet werden.

Vorgesehene Patientengruppe

- Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Anwendung bei Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen

Die Anwendung des GERUT® Umbettungstuches bei diesen Patientengruppen bedarf keiner besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Bei der spezifischen Behandlung sind die Therapieempfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften zu beachten.

Medizinprodukte, die gemeinsam mit dem GERUT® Umbettungstuch verwendet werden können

Das GERUT® Umbettungstuch kann bei bestimmungsgemäßer Anwendung mit allen zum Patiententransport oder Patientenlagerung zugelassenen Medizinprodukten kombiniert werden. Als Beispiele hierfür gelten: Krankentrage, Vakuummatratze, Schaufeltrage, Tragetuch, Spineboard/Langes Wirbelsäulenbrett, Tragestuhl nach DIN EN 1865 oder Helikoptertrage, Krankenbett, Röntgentisch, Ambulanzliege usw. (Liste nicht abschließend – bei fraglicher Kombinationsmöglichkeit bitte Kontakt mit dem Sicherheitsbeauftragten für Medizinprodukte des Herstellers unter mpsicherheit@werkverein-ge.de aufnehmen)

Unerwünschte Nebenwirkungen bei Anwendung des Medizinproduktes

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des GERUT® Umbettungstuches sind keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten.

Überprüfung des sicheren und betriebsbereiten Zustandes des Medizinproduktes

Vor Anwendung des GERUT® Umbettungstuches muss dieses durch eine Sichtkontrolle auf einen einwandfreien Zustand hin überprüft werden. Dies gilt insbesondere für sachgerecht wiederaufbereitete GERUT® Umbettungstücher.



Als Maßnahme bei vermuteter oder offensichtlicher Beschädigung eines GERUT® Umbettungstuches darf dieses Medizinprodukt nicht angewendet werden und sollte umgehend gegen ein neues, original verpacktes GERUT® Umbettungstuch ausgetauscht werden.

Hinweise zu eventuellen wechselseitigen Störungen bei Untersuchungen und Behandlungen

Das GERUT® Umbettungstuch ist durchlässig für Röntgenstrahlung und nicht magnetisch und kann daher auch während der Durchführung einer Röntgenuntersuchung / Computertomographie / Magnetresonanztomographie unter dem Patienten belassen werden.

Wiederaufbereitung - Reinigung und Pflege / Desinfektion

Das GERUT® Umbettungstuch kann mit Wasser und einer Seifenlösung grob gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung der PE beschichteten Oberfläche führen kann, ist zu vermeiden. Desinfektion, in Form einer Oberflächen-Wischdesinfektion, ist mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln der Substanzklassen der Alkohole, Aldehyde und Amine möglich. Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen, was wiederum die Leistungsfähigkeit und Sicherheit des Produktes beeinflussen kann. Keine Lösungsmittel verwenden!

Bei Fragen zur Anwendbarkeit spezieller Desinfektionsmittel kontaktieren Sie bitte den Sicherheitsbeauftragten für Medizinprodukte des Herstellers unter mpsicherheit@werkverein-ge.de.

Wiederverwendbarkeit des GERUT® Umbettungstuch

Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden.



Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugen haben. Es dürfen nur Produkte in einwandfreiem technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

Technische Angaben

Länge x Breite:	185 x 76 cm
Maße verpackt :	22 x 20 x 4 cm
Gewicht :	460 g
Maximale Belastung :	110 kg

Das Produkt ist latexfrei



Gewährleistung

Für dieses Produkt übernimmt der Hersteller die Gewährleistung, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Diese erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller.

Angaben zur sachgerechten Entsorgung des Medizinproduktes

Die Verpackungs-Hülle kann, nach den lokalen Vorgaben, im Kunststoffabfall entsorgt werden. Nach einer ordnungsgemäß durchgeführten Desinfektion kann das gebrauchte GERUT® Umbettungstuch im Restmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie Ihre lokalen Vorgaben zur Entsorgung von Restmüll.



Hersteller:

Gelsenkirchener Werkstätten
für angepasste Arbeit gGmbH
Braunkämperstrasse 100
D - 45899 Gelsenkirchen
Fon: +49 (0) 209 / 95896-0
Fax: +49 (0) 209 / 95896-8484

eMail: sales@rettungstuch.com

Internet: www.rettungstuch.com



Dieses Produkt ist konform mit den
Grundlegenden Anforderungen der EG Richtlinie
93/42/EWG für Medizinprodukte

Stand 01.02.2019

Technische Änderungen vorbehalten



**Die Inhalte dieser Gebrauchsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche
Verwendung, auch nur auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung.**